

Hinweise zur Probenahme

1. Als Probenmaterial für die Geschlechtsbestimmung und einer viralen Untersuchung sind 2 frische Federn mit Kiel (vorzugsweise) oder 1-2 Tropfen Blut auf einem Stück Filterpapier geeignet.
2. Für jeden Vogel bereiten Sie bitte einen separaten Umschlag oder einen kleinen Plastikbeutel mit Druckverschluss vor. Beschriften Sie diesen mit einer der Vogelart und der Kennzeichnung (Ring-Nr. oder Chip-Nr.) des Vogels. Diese Information übernehmen Sie auch in das Auftragsformular.
3. Wählen Sie **Federn** als Probenmaterial, so verwenden Sie bitte nur frisch gezupfte Federn aus Schwanz oder Schwinge - ausgefallene oder alte Federn versagen häufig in der Analyse. Für den Test senden Sie uns mindestens 2 Federn. Entscheidend für die Analyse ist der Federkiel – das andere Ende der Feder kann bei Bedarf für den Versand gekürzt werden. Legen Sie die Federn in den vorbereiteten Umschlag oder Plastikbeutel.
4. Wollen Sie die Untersuchung mit einer **Blutprobe** durchführen lassen, so genügen 1-2 Tropfen Blut auf einem Stück Filterpapier (z.B. Küchenrolle). Die Entnahme wird leicht möglich, indem Sie die Kralle gerade soweit abschneiden, dass sich ein kleiner Blutstropfen bildet, der auf das Filterpapier übertragen wird. Lassen Sie den Tropfen gut trocknen und legen Sie das Filterpapier danach in die Versandtüte.
5. Für eine Chlamydienuntersuchung ist ein **Kloakenabstrich** geeignet. Mit einem sterilen, trockenen Wattetupfer entnehmen Sie durch mehrmaliges Drehen zellhaltiges Material. Geben Sie die Tupfer in sterile unbeschichtete Röhrchen ohne Transportmedium.
6. Füllen Sie das Auftragsformular für jedes Tier sorgfältig und lesbar (Druckbuchstaben) aus, und prüfen Sie nochmals die Angaben mit denen auf der Versandtüte. Vermeiden Sie unter allen Umständen eine Vermischung des Probenmaterials.
7. Verpacken Sie die das Probenmaterial gemeinsam mit dem vollständig ausgefüllten Auftragsformular und senden alles an die BIOFOCUS.

BIOFOCUS
Gesellschaft für biologische Analytik mbH
- Tiergenetik -
Berghäuser Str. 295
45659 Recklinghausen
Deutschland

6. Die Untersuchungsergebnisse und das Zertifikat werden Ihnen innerhalb von 4-5 Tagen nach Probeneingang schriftlich zugestellt. Ein Zertifikat kann nur ausgestellt werden, wenn die Ring- oder Chipnummer angegeben ist. Haben Sie Ihre Telefonnummer angegeben, werden Sie vorab telefonisch informiert.
7. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne jederzeit unter unserer Rufnummer 02361/3000-222 oder 02361/3000-137 zur Verfügung.